



Instruktion för blodutstryk

Vid längre transporter, om provet inte kommer fram samma dag ska blodutstryk medfölja provröret.

Före utstryk ska objektglaset märkas med patientens namn och personnummer. Märkning av objektglas ska tåla reagensvätskor, använd blyertspenna. Tre utstryk per patient bör göras.

Vid beställning av cellklassificering av leukocyter ska alltid blodstatus beställas samtidigt.

Prov med koagel kasseras.

Utstryken ska göras snarast möjligt efter provtagning, helst inom 4 timmar, eftersom blodkropparna åldras och EDTA förändrar morfologin på cellerna.

Gör utstryk på ett rent objektglas (artnr 16720) på vilket en droppe (5-10µl) rumstempererat, välblandat blod (motsvarande 20 hela vändningar för hand) placeras vid ena kanten. Ett utstryksglas sätts framför bloddroppen i ca 30-45 graders vinkel och förs bakåt så att blodet flyter ut bakom utstryksglasets. Därefter skjuts utstryksglasets framåt över objektglaset med en stadig och jämn handrörelse så att blodfilmen blir jämn och får en gradvis övergång från tjock till tunn film. Utstryket måste vara minst 30mm långt och ha ett avstånd på 5-15 mm från kanten. Utstryken lufttorkas omedelbart genom att vifta med glaset.

För frågor ring gärna tel: 063-153615 internt 23615

Med vänlig hälsning

Hematologi sektionen
Laboratoriemedicin
Östersund sjukhus